



Living  
Technology  
Company

旭硝子グループ生活関連事業

## 連続式電解還元水生成器

医療用物質生成器 医療用具承認番号: 21600BZZ00023000

「水」からつくりだす5種類の新しい「機能水」。ヴァリュークラスター。

# Valuecluster



Valuecluster

ヴァリュークラスター/LB-461



# 5種類の「機能水」を ワンタッチで生成します。

連続式電解還元水生成器／ヴァリュークラスターは、電解還元水(陰極水)・電解酸化水(陽極水)・浄水・衛生水(強酸性水)・強アルカリ性水の5種類の水をご家庭の水道水などから生成できます。

## 1 健康 電解還元水

貴重の健康維持に  
飲み水として  
**■効能効果**  
胃腸内の異常発現／慢性下痢／  
消化不良／制酸／胃酸過多

## 2 美容 電解酸化水

お肌のお手入れに  
美容水として  
**■効能効果**  
弱酸性のアストリンゼント  
(化粧水)として美容に。

## 3 清水 净水

よりおいしく・きれいに  
毎日の飲み水に  
**■特長**  
抗菌活性炭が水道水のカルキ・  
臭い・ニゴリなどを除去。

## 4 衛生 衛生水(強酸性水)

手洗いからふき掃除まで  
家庭の衛生に  
**■特長**  
次亜塩素酸(HClO)を主成分  
とする強酸化力の強い水。

## 5 清浄 強アルカリ性水

キッチンやお鍋の  
お手入れに  
**■特長**  
強アルカリ性の水で、油分などの分解に優れています。



### ●ご利用例

●飲み水に  
手に泡立ちやすいつまらない水で整髪する毎日を。

### ●ご利用例

●アストリンゼントに  
弱酸性の洗顔料やお化粧水などもさくさくめで  
てキメ細かくなるに。

### ●ご利用例

●湯の花風呂に  
手洗物をすりぬいた静  
水は、手を乾燥するよ  
うに保湿。

### ●ご利用例

●食器・マグの清潔に  
抗菌洗浄力があついつ  
もビオビオ衛生的。

### ●ご利用例

●レンジ・油茹地の  
油汚れに  
油汚れの拭きき機能や  
つけ置き機能。

### ●ご利用例

●朝茶・コーヒー・ワーロン等・洋芋・米飯に  
油くずを落とす。さり  
よくマヨネーズを落とす。

### ●ご利用例

●洗濯のリinzスに  
セサミラの衣に巻き上  
がります。

### ●ご利用例

●赤ちゃんのミルクに  
特にやさしい水で  
ミルクを。

### ●ご利用例

●手洗の清潔に  
手洗いは衛生の基本。  
手の仕事に。

### ●ご利用例

●おしゃりに  
おしゃりが取扱い衛  
生的。

### ●ご利用例

●洋服や寝具に  
ムーミンでないらしい  
が巻き上がり、直さみに  
く直さなくて済みます。

### ●ご利用例

●ヒゲソリの邊に  
アストリンゼントを差  
しでお肌を整えます。

### ●ご利用例

●おしゃりのミルクに  
特にやさしい水で  
ミルクを。

### ●ご利用例

●おしゃりの  
おしゃりが取扱い衛  
生的。

### ●ご利用例

●おしゃりの  
おしゃりが取扱い衛  
生的。

### ●ご利用例

●お風呂の水割りに  
お湯の旨みを引き立て  
ます。

### ●ご利用例

●野菜ゆで・アグリネ  
煮・いんじ粉・アグリネ  
色鮮やかに、香、食感は  
不要です。

### ●ご利用例

●おしゃりの  
おしゃりが取扱い衛  
生的。

### ●ご利用例

●おしゃりの  
おしゃりが取扱い衛  
生的。

### ●ご利用例


●おしゃりの  
おしゃりが取扱い衛  
生的。



※1 本製品は水道水など飲用に水を供給した水を対象にしています。  
※2 電解酸化水・弱酸水(強酸性水)・強アルカリ性水は飲用できません。  
※3 洗浄・衛生水(強酸性水)・強アルカリ性水に濃度計測はありません。

# カラダにいい「健康な水」を


ヴァリュークラスターの心臓部ともいえる電解槽には、旭硝子のイオン交換膜技術が生かされています。これは、世界的にも注目されている燃料電池開発を支える技術として高く評価されているもので、環境問題を解決する21世紀の先端技術といえます。体の健康に必要なミネラルイオンを選んで透過する性質を持っているこの優れた交換膜を採用することでイオン交換性能が大幅にアップし、電解還元水が効率よく生成できます。

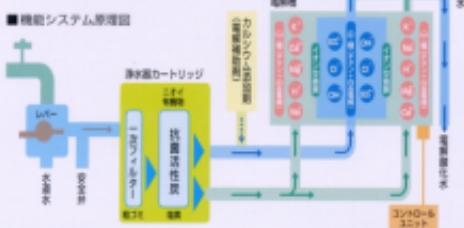

## 寿命が長い浄水器カートリッジ。

ヴァリューカラスターの  
浄水器カートリッジは、容  
積が大きく、浄水能力も高  
く、長寿命です。

残留塩素除去能力  
30,000リットル  
1日10Lを  
利用しても  
約48ヶ月間

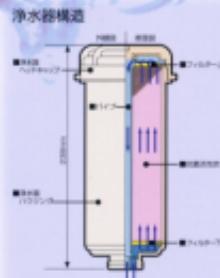

抗酸化活性炭が水道水のカ  
ルキ・銅イニコリなどを取  
り除き、おいしい水をつく  
ります。

## 電解槽にイオン交換膜(フレミオノン膜) 電極にチタン+白金を採用。


優れた耐久性 (当社試験品)  
必要なミネラルイオンだけを選択的に通過

ヴァリューカラスターの心臓部の電極には、耐久性と選択性に優れたチタン+白金電極を使用し、電解槽には国内外の工場で食塩製造や飲料水製造、医薬・食品の精製、また、企業のエネルギーとして注目されている燃焼電池などに幅広く活躍する、旭硝子の工業用イオン交換膜「フレミオノン」を使用しています。「フレミオノン」の特徴は、酸やアルカリに強く、カルシウム頭部が特に強く、「中性膜」に比べて約10倍の強度を持ち(当社従来比)電解還元水の生成に最適です。

水中から人間の体に必要なミネラルイオンだけを選んで透過する性質を持っているので、電解還元水が効率よく生成できます。

## 電気分解におけるイオン交換膜と中性膜の違い

### イオン交換膜(フレミオノン膜)

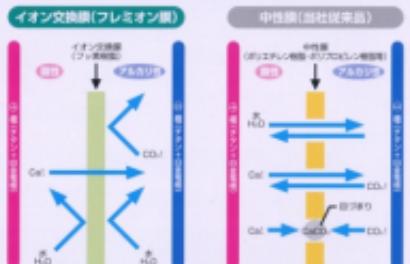

### 中性膜(当社試験品)

- 特徴
  - ・耐久性：「フレミオノン膜」よりも強度が高く、酸やアルカリに強く、選択性が高く、また、酸やアルカリに対する耐久性が高く、長寿命です。
  - ・選択性：○酸、△アルカリ強度
    - ・酸：△酸
    - ・アルカリ：△アルカリ
  - ・強度：○酸、△アルカリ強度
    - ・酸：△酸
    - ・アルカリ：△アルカリ
- 特徴
  - ・選択性：○酸、△アルカリ強度
    - ・酸：△酸
    - ・アルカリ：△アルカリ

# 、イオン交換膜技術でつくります。

スイッチひとつで電解還元水の設定pH値が選べます。  
見やすいデジタル表示だから確認も簡単です。

## ワンタッチでお好みのpH設定値に切り替えOK!

「飲用鏡」または「飲用鏡」モードに切り替えることで、さらじめ定義したpH値を自動設定されます。(各モードは5段階にて設定値を変更できます。)「強電解」モードでは流量により設定pH値が変化します。各々の設定pH値はデジタルでハッキリ見やすく表示されます。

※ただし、水質・水圧により設定値と実際のpH値が異なることがあります。

## 衛生水(強酸性水)生成も簡単。

専用カートリッジに食塩を入れ、電解するだけで次亜塩素酸(HClO)を生成成分とする酸化力の強い強酸性の水を生成します。

## 音声でお知らせ。

制御用マイクロコンピュータの物に直音専用マイクロコンピュータを内蔵。「洗浄お知らせ」「淨水漏カートリッジ交換手順」「エラー発生時の対応」などを音声(音量調節スイッチ付)でお知らせします。電解還元水の生成中には、さわやかな声でカッコが流れきます。

- 時計表示ランプ表示部に時計を表示しているときに点灯します。
- 洗浄表示ランプ衛生水(強酸性水)およびアルカリ性水生成時の機能を示すときに点灯します。
- 浄水点滅ランプ浄水の水栓・交換周期を示すときに点滅します。
- 操作パネル操作パネルの左の内面にあるパネルです。
- 蓄積調節スイッチスピーカーの音量を4段階に切替えるスイッチです。
- モード切替スイッチ各種の設定時に押します。
- アップスイッチ設定数字を上げたりOFF設定する時に押します。
- ダウングスイッチ設定数字を下げたりOFF設定する時に押します。
- 電解モニタースイッチ電解水と淨水を切替えるスイッチです。
- 流量モニタースイッチ電解水流量を表示します。(1分表示が終了するまで繰り返します。)【アラーム動作で表示します。】
- 流量モニタースイッチ停止時に押すと瞬間流量を表示、電解濃度と水生成中に押すと流量を表示します。
- 標準モード設定スイッチこのスイッチを押すと各機能の設定が標準状態に再設定されます。

## 温水流入警報装置付き。

安全にお使いいただくため、誤って温水が流入した場合にはセンサーが働いて、「警報」を音声でお知らせします。

## 便利なキッチンタイマー、デジタル時計。

使い手を重視するため、料理などに大活躍するキッチンタイマーとデジタル時計が付いています。

## 多機能コンパクトサイズ

心臓部の電解槽に「2WAY電解槽」を採用。1槽分のスペースで2槽分の働きをするため、多機能でありながら台面でシャワーにならないコンパクトサイズが実現できました。

## たっぷり使って大満足。

1分間に約5リットルの電解還元水と約2リットルの電解化水を同時にできます。(最大流量時)



## センサーの採用により流量を正確に測定。

センサーが正確に流量を測定し、電解電流をコントロール、水圧の変化などによる異常を防ぎ、電解還元水を安定して生成します。

## 1つの蛇口から、3つの水が選べる。

取り付けは蛇口直結。生成した電解還元水はホースで蛇口に戻るリターン式。流し台のすぐそばに置き場所がなくなります。「電解還元水/淨水/温水(水道水)/シャワー(浄水器)」の切り替えも簡単です。シャワーは水はねが少なく、食器洗いなどに適です。



●表示部  
時計、pH値、蓄積調整、洗浄等を表示します。  
pH表示は電解水生成時、電解還元水の設定pH値を表示します。

●キッチンタイマー表示ランプ  
蓄積部にキッチンタイマーが表示されているときに点灯します。

●洗浄表示ランプ  
本体部の洗浄時間ランプの点滅によりお知らせします。本体内部の洗浄中はランプが点灯します。

●操作パネル

●電解水・淨水スイッチ  
電解水と淨水を切替えるスイッチです。

●pH調整スイッチ  
電解水の電気分解の強さを切替えるスイッチです。貯蔵時、使用時、強电解の3段階調整ができます。

●キッチンタイマースイッチ  
台所仕事のタイマーの役目をします。1分一回の設定ができます。スイッチを持ち時間の経過を示す音を響かせるとカウントダウンが始まります。タイムアップするとビーピー音が鳴ります。

●洗浄スイッチ  
内部洗浄をする時に押すスイッチです。

●衛生水(強酸性水)スイッチ  
衛生水(強酸性水)を強アルカリ性水を生成する時に押すスイッチです。

# 私たちのカラダの約70%は水でできています。

私たちのカラダの約70%は水です。そして、常に新しい水をカラダが求め、水が循環し排泄されることで、健康が保たれています。毎日飲む水だから健康のために水の「質」を選択することが求められています。

ヴァリュークラスターは、先端技術を駆使して水道水などから5種類の機能水「健康・電解還元水」「美容・電解酸化水」「清水・浄水」「衛生・強酸性水」「清淨・強アルカリ性水」をつくりだす「電解還元水生成器」です。料理から健康管理まで幅広く水を選択できるヴァリュークラスターを、健康で快適な暮らしにお役立てください。

## pH(水素イオン濃度)とは

水素イオン濃度を示す記号で、pHを中性、数値が大きくなるほどアルカリ性を示し、反対に数値が小さくなるほど酸性を示します。一般的にアルカリ性が高くなるほど還元度も高くなり、酸性になるほど酸化度も高くなります。

## 酸化と還元とは

物質を詰びかせる(酸素を与える)ことを酸化と言い、酸化したものを元に戻す(酸素を奪う)ことを還元と言います。人間の体内でも同様の現象が行なわれていると言われており、活性酸素は酸化を起こさせるものの代表的な例と言われています。


## 酸化還元電位とは

物を酸化させる電気エネルギーを持っているか、物を還元させる電気エネルギーを持っているかを表す指標です。

## 活性酸素とは

活性酸素とは、構成する電子のひとつが不安定になった酸素で、体内に吸収した酸素の約2%がこれになるとされています。活性酸素には、体内に入った異物を殺す大切な働きがあります。しかし、その一方で体内的な物質と結合して酸化コレステロールや過酸化脂質をつくり遺伝子DNAを傷つけたり、老化やガン、動脈硬化、高血圧、糖尿病などの様々な疾患の原因となっていると言われています。活性酸素を育成する要因としては、大気汚染、喫煙、ストレス、過度の運動などがあげられています。

## 水の酸化還元度合い

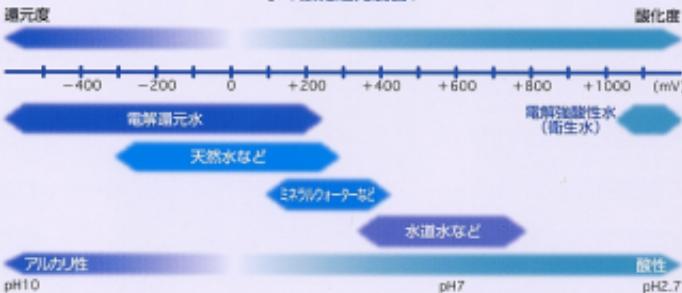

## ●ヴァリュークラスターの仕様

品名・型式	逆滲透電解濃元水生成器 LB-461 (ヴァリュークラスター)
定格電圧	AC100V
定格周波数	50・60Hz
定格入力電流	AC3.8A
電解電圧・電流	0.05~45V・1.5~4.5A 8/4
電解濃元水流量	1~5g/分 ≈5
浄水器で除去できる成分	カルシウム、カビ臭、にごり等
浄水器で除去できない成分	水中に溶けているイオン類(塩分、金属イオン等) 硬水を軟水に変えることはできません。
給水ホース	リターンホース
酸化水ホース	各1.5m
使用可能水頭圧	50~750kPa (0.5~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )
浄水器機能除去能力	約30,000L ≈8(注1)
製品寸法	高345×幅234×奥行155 (mm) ≈7
製品質量	約8kg (本体のみ)
認証取得	
医療用具承認番号	216008Z2000230000

(注4) 水頭圧により操作が出来ります。(注5) 電圧による操作です。

(注6) 赤色の灯によって異なります。(注7) 実験結果は含まれません。

(注8) 本機種は電解濃度を2ppmとして、浄水器でろ過後の電解濃度が0.1ppmになるまで(電解濃度水頭圧200L ≈100L)電解濃元水・電解濃化水合計量)、0.4ppmのとき80,000L ≈4であることを表示します。

●電解濃元水生成器は、水圧が弱い場合は減少します。

●浄水器との接続部は、水圧によって異なります。

●市販の水栓は、アーチカルリ性や直角形等取り扱っていません。

●電解濃元水・電解濃化水(強酸性)はアルカリ性水は出せません。

●電解濃元水・電解濃化水(強酸性)はアルカリ性水は出せません。

●電解濃元水(強酸性)は、ヴァリュークラスターの取り付けができない場合があります。詳しくは、近くの販売店にお問い合わせください。

●電解濃元水をアルミや鉄製の容器に入れた場合、サビ等を生じることがあります。

## ご使用上の注意 安全のために必ずお守りください。

- 医療用電解濃元水でご使用しないでください。
- 無理の方は、電解濃元水を飲むしないでください。
- 電解濃元水を飲んで身体に異常を感じたとき、または効果がみられない場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 次の二つは、医療用電解濃元水を飲む時は薬剤師にご相談ください。
  - 熱湯のうちは、医療用電解濃元水を飲む時は薬剤師にご相談ください。
  - 熱湯のうちは、または体の温っている方。
  - 汗腺・汗腺嚢等の有る方。
  - 医師または薬剤師の治療を受けている方。
  - 医師または薬剤師の治療を受けている方や身体に異常を感じているとき。
- 次の二つは、電解濃化水を使用する前に医師または薬剤師にご相談ください。
  - 筋肉の痛み。
  - アレルギー体質の方。
- 飲んで飲める方は最初のうち中性に近い0.5%の電解濃元水を少量から飲めてください。
- 本製品は水道水など飲用水と合流した水を対象としてあります。
- 本製品は日本全国でご使用ください。
- ご使用の前、取り扱い説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

### ■本体LB-461 オープン価格

■淨水器カートリッジBA01-CTG  
標準小売価格 13,800円(税込14,480円)  
■取付け工事費 15,000円(税込15,750円)



Valuecluster™

ヴァリュークラスター/LB-461

### ■ヴァリュークラスター+オプション品

●逆滲透中空膜入りカートリッジ 19,800円(税込20,790円)

●逆滲透中空膜入りカートリッジ(壁掛式カートリッジ)2本入り 19,000円(税込19,950円)

●衛生用強酸性水・生活用弱酸性水アトリル(1台7.6L×4点入り)11,800円(税込12,590円)

●衛生用強酸性水・生活用弱酸性水アトリル(1台7.6L×4点入り)11,